

Termometru fără contact

●FR800

Instrucțiuni de utilizare



Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza acest produs

1. INFORMAȚII PRELIMINARE

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de prima folosire, deoarece măsurarea corectă a temperaturii depinde doar de utilizarea corespunzătoare a dispozitivului. Aceste instrucțiuni descriu etapele individuale de măsurare a temperaturii folosind termometrul cu infraroșu și conțin indicii importante și utile pentru determinarea fiabilă a temperaturii corpului. Asigurați-vă că păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru referințe viitoare.

2. INTRODUCERE

Stimate client, ne bucurăm că ați decis să cumpărați un termometru clinic. Termometrul cu infraroșu fără contact este un produs de calitate pentru măsurarea temperaturii corpului uman pe frunte, este ideal pentru măsurări la copii începând cu vârsta de 6 luni, termometrul putând fi folosit și la adulți. Prin utilizarea corectă, dispozitivul asigură o măsurare rapidă și precisă a temperaturii corpului într-o manieră foarte confortabilă. Vă dorim tot ce este mai bun pentru sănătatea dvs.

Indicații de utilizare:

Termometrul cu infraroșu este destinat să detecteze temperatura corpului de pe frunte pentru populație, inclusiv la sugar (peste 6 luni), copil, adolescent și adult.

3. BENEFICIILE TERMOMETRULUI

Măsurări fără contact în câteva secunde

Senzor infraroșu inovator de înaltă tehnologie: pentru a finaliza măsurarea în siguranță și precis în câteva secunde.

Măsurarea temperaturii corpului și obiectelor

Puteți alege să efectuați măsurarea temperaturii corpului sau a unui obiect prin acționarea comutatorului glisant.

Atenționare de febră

Fundalul roșu al ecranului și 10 sunete scurte pentru a anunța că pacientul poate avea febră.

Afișarea a 30 de măsurări de temperatură

Când intrați în modul de memorie, puteți vizualiza ultimele 30 de măsurări.

Afișarea automată a măsurării din memorie

Acest termometru afișează ultima măsurare automat timp de două secunde la pornirea dispozitivului.

4. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Nu folosiți niciodată produsul în alte scopuri, cu excepția utilizării recomandate. Vă rugăm să respectați precauțiile generale de siguranță atunci când utilizați instrumentul pentru copii.

Acest termometru nu trebuie niciodată scufundat în apă sau în alt lichid (nu este impermeabil). Pentru curățare și depozitare, citiți cu atenție instrucțiunile din secțiunea 8.

Nu este permisă nicio modificare a acestui echipament

Vă rugăm să păstrați termometrul într-un mediu curat și uscat; evitați lumina directă a soarelui; temperatura de depozitare trebuie să fie între -4 și 131 F / -20 și 55 °C.

Vă rugăm să nu folosiți termometrul în cazul în care capul de detectare sau corpul au fost deteriorate și nu încercați să-l reparați atunci când este deteriorat.

Acest termometru fără contact este format dintr-o piesă de precizie de înaltă calitate. Nu aruncați instrumentul!

Protejați-l de impacturi și șocuri severe. Vă rugăm să nu-i răsușiți corpul și/sau capul cu senzor.

Eliminați corect bateriile, ferindu-le de copii mici și de căldură.


Dacă bateriile sunt înghițite, consultați imediat un medic.

Atenție:

Utilizarea termometrului fără contact nu trebuie să înlocuiască vizitarea unui medic.

5. DESCRIEREA PRODUSULUI

(1) Vedere laterală

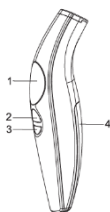


(2) Vedere spate



Nr	Element	Stare	Descriere
1	Afișaj		Afișează măsurătorile și alte simboluri corespunzătoare
2	Butonul SCAN	Stare Off	Apăsați o dată pentru a intra în modul memorie
		Stare On	Apăsați pentru a efectua măsurarea
3	Butonul O/I		Apăsați pentru a porni/ opri termometrul
4	Capac baterie		Protejează bateria
5	Cap de măsurare		Măsurare cu infraroșu
6	Comutator glisant	Mod de măsurare	Selectare modului: temperatura corpului Glisați comutatorul în sus.
			Selectarea modului: temperatura obiectelor Glisați comutatorul în jos.

Componente:

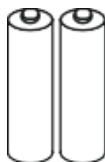

2 baterii “AAA”

Termometru fără contact

@FR800

Instrucțiuni de utilizare



Manual de instrucțiuni

6. AFIȘAJ ȘI DESCRIEREA IMAGINILOR

Descrierea imaginilor de pe afișaj

Imagine	Setare	Descriere
	Mod corp	Se pot face măsurări ale temperaturii corpului uman
	Mod obiect	Se pot face măsurări ale temperaturii obiectelor
	Grade Celsius	Stabilire sistem de măsurare
	Grade Fahrenheit	
	Mod memorie	Afișează valoarea măsurată din memorie

Diferite tipuri de informații din zona de afișare

Afișaj	Procedură	Descriere
	Pornire	Porniți acest dispozitiv apăsând butonul O/I. Toate informațiile vor fi afișate timp de două secunde.
	Memorie	Ultima citire va fi afișată automat pe ecran timp de două secunde. Apare și imaginea modului de măsurare - corpul uman sau obiect.
	Pregătire măsurare	Acest dispozitiv este pregătit pentru măsurare, imaginea °F (°C) va continua să clipească.
	Finalizarea măsurării	Citirea va fi afișată pe ecranul LCD, pe fundal roșu pentru valoarea măsurată mai mare de punctul de febră și fundal verde pentru valoarea măsurată mai mică decât punctul de febră
	Pentru a începe următoarea măsurare	Aproximativ două secunde mai târziu, imaginea °F (°C) va clipi; dispozitivul este pregătit pentru următoarea măsurare.


7. UTILIZAREA TERMOMETRULUI

Cum se comută între °C și °F?


Apăsați butonul SCAN aproximativ 8 secunde când termometrul este oprit. Acesta va porni, afișând unitatea setată °C sau °F. Dacă aceasta nu este unitatea dorită, apăsați imediat, din nou, pe butonul SCAN.

Măsurarea temperaturii corpului uman

1. Apasați butonul O/I când este dispozitivul este oprit.
2. Apasați butonul O/I când este dispozitivul este pornit.
3. Glisați întrerupătorul în sus pentru a intra în modul de măsurare a temperaturii corpului.
4. Apăsați butonul O/I, ecranul se va aprinde afișând toate imaginile.
5. Ultima citire și imaginea M vor fi afișate automat timp de două secunde.
6. Termometrul va intra în starea pregătit:
 - a. Se va auzi un sunet scurt.
 - b. Imaginea °F (°C) și poziția de referință vor clipi pe ecran.

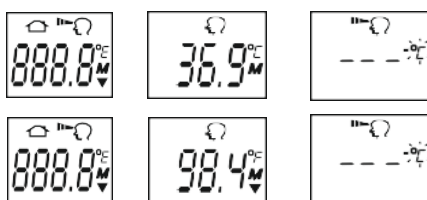

7. Pentru a începe măsurarea, țineți termometrul în centrul frunții, la cel mult 5 cm distanță. Dacă pe frunte există păr, transpirație sau praf, vă rugăm să o ștergeți sau curățați, pentru a îmbunătăți precizia.
8. Apăsați butonul “SCAN” pentru 2 secunde, eliberați-l și astfel măsurarea începe.
9. Veți auzi un semnal sonor lung, asta înseamnă că măsurarea s-a terminat, puteți citi valoarea temperaturii pe ecran, așa cum se arată mai jos.

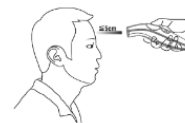


10. Analizarea inteligentă a temperaturii corpului.

Dacă temperatura măsurată este sub 99,5 °F (37,5 °C), rezultatul măsurătorii va fi afișat pe ecran cu un semnal sonor lung și lumina de fundal verde.

Dacă temperatura măsurată este mai mare de 99,5 °F (37,5 °C), rezultatul măsurării va fi afișat pe ecran și se vor auzi 10 sunete scurte. Lumina de fundal roșie și sunetele scurte avertizează pacientul că are o temperatură peste 37,5 °C.

Măsurarea temperaturii obiectelor

1. Glisați întrerupătorul în sus pentru a intra în modul de măsurare a temperaturii obiectelor.
2. Apăsați butonul O/I, ecranul se va aprinde afișând toate imaginile.
3. Ultima citire și imaginea M vor fi afișate automat timp de două secunde.
4. Termometrul va intra în starea pregătit:
 - a. Se va auzi un sunet scurt.
 - b. Imaginea °F (°C) și poziția de referință vor clipi pe ecran.

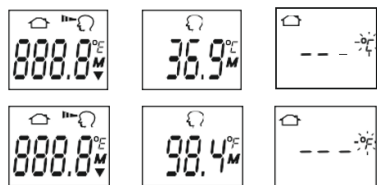

5. Îndreptați termometrul către centrul obiectului, la cel mult 5 cm distanță. Dacă există apă, praf sau murdărie pe obiect, vă rugăm să îl ștergeți pentru a îmbunătăți precizia.



6. Apăsăți butonul “SCAN” cu termometrul îndreptat spre centrul obiectului pentru 2 secunde, eliberați-l și astfel măsurarea începe.
7. Veți auzi un semnal sonor lung, asta înseamnă că măsurarea s-a terminat, puteți citi valoarea temperaturii pe ecran, așa cum se arată mai jos.




Atenție:

- Vă rugăm să mențineți utilizatorii și termometrul la o temperatură stabilă a camerei, timp de cel puțin 30 de minute înainte de utilizare.
- După măsurare continuă, vă rugăm să așteptați cel puțin două minute pentru a porni sau opri din nou termometrul.
- Nu efectuați o măsurare imediat sau o perioadă de timp după alăptare.
- Nu folosiți niciodată termometrul într-un mediu cu temperaturi ridicate.
- Înainte sau în timpul măsurării, nu beți, nu mâncați și nu vă deplasați.
- Vă rugăm să curățați zona de scanare și să îndepărtați praful, părul sau transpirația înainte de a utiliza termometrul.
- Vă rugăm să îndepărtați apa, praful sau murdăria de pe obiect înainte de măsurare.
- Vă rugăm să nu îndepărtați termometrul înainte de a auzi sunetul lung de la sfârșitul măsurării.
- Dacă se constată că senzorul capului este murdar după sau în timpul măsurării sau înainte de a pune termometrul înapoi în cutie, vă rugăm folosiți vată cu alcool pentru a-l șterge cu atenție.
- Vă rugăm să încercați să măsurați în aceeași zonă; rezultatele vor fi diferite dacă faceți măsurătoarea în alte zone.
- Deoarece funcția de reglare a temperaturii bebelușului nu este perfectă, nu efectuați măsurarea imediat după ce bebelușul intră într-un mediu cu diferențe mari de temperatură, pentru a evita abaterea măsurării temperaturii.
- Vă recomandăm să folosiți termometre de tip general pentru măsurare în următoarele cazuri:
 1. Rezultatele măsurării sunt mai mari sau mai mici decât se așteaptă.
 2. Nou-născut mai mic de 100 de zile.
 3. Copiii sub 3 ani care au un sistem imunitar deficitar, au febră foarte mare sau nu au febră.





8. UTILIZAREA TERMOMETRULUI

Termometrul poate memora automat 30 de valori de măsurare. Vă rugăm să urmați următoarea secvență pentru a citi valorile din memorie.


1. În starea oprit, apăsați butonul „SCAN” aproximativ 3 secunde; puteți intra în modul de memorie de citire. Imaginea „M” va clipi pe ecran.

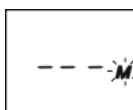


2. Apăsăți butonul “SCAN” din nou; ”1” va apărea pe ecran și ultima valoare măsurată iar imaginea “M” va clipi.

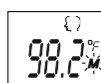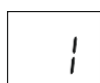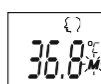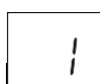

3. După aceea, apăsați din nou butonul „SCAN”, va apărea pe ecran „2” și apoi penultima valoare măsurată iar imaginea „M” va clipi.

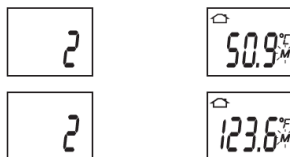

4. Apăsând continuu butonul „SCAN”, vor fi afișate în ordine cele 30 de valori măsurate.

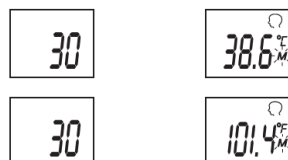

Apăsați butonul de măsurare „SCAN” după citirea celei de-a treizecea valori, acesta va reveni la cea mai recentă valoare măsurată.

9.MESAJE DE EROARE

Valoare pe afișaj	Semnificația afișajului	Cauze posibile și metode de depanare
	Temperatura ambiantă este prea mare	Temperatura de măsurare este mai mare de: 109.4°F(44°C)(mod corp) 212°F(100°C)(mod obiect)
	Temperatura ambiantă este prea scăzută	Temperatura de măsurare este sub: 89.6°F(32°C) (mod corp) 32°F(0°C) (mod obiect)
	Temperatura de măsurare este prea mare	Temperatura mediului este mai mare de 104°F (40.0°C) (mod corp / mod obiect)
	Temperatura de măsurare este prea mică	Temperatura mediului este sub: 59°F (15°C)(mod corp) 41°F(5°C)(mod obiect)
	Afișare eroare	Eroare de sistem
	Ecran alb	Vă rugăm să verificați dacă bateria este instalată corect și să verificați polii negativi și pozitivi ai bateriei
	Indicator baterie scăzută	Dacă ecranul afișează doar o imagine fixă cu bateriei, bateria trebuie înlocuită


10.CURĂȚARE, DEPOZITARE ȘI MENTENANȚĂ

Curățați carcasa și capul senzorului cu o cârpă de bumbac umedă sau îmbibată în izopropil 70%; asigurați-vă că nu lăsați lichidul să intre în interiorul produsului. Vă recomandăm să curățați termometrul când ați terminat măsurătorile personale, de fiecare dată.

Nu folosiți agent de curățare abraziv, diluant sau gaz pentru curățare.

Nu scufundați produsul în apă sau în alt lichid.

Aveți grijă să nu zgâriați suprafața LCD. Dacă termometrul nu este utilizat mult timp, vă rugăm să scoateți bateria din el, pentru a evita deteriorarea acestuia de la posibila scurgere a bateriei.

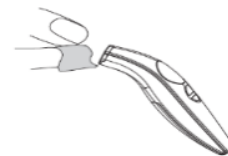

11.OBSERVAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ȘI RECICLAREA

- Folosiți numai baterii de înaltă calitate (consultați specificațiile din capitolul „Date tehnice”).
- Nu amestecați niciodată baterii noi cu baterii vechi sau fabricate de diferiți producători.
- Scoateți imediat bateriile consumate.
- Dacă nu intenționați să folosiți dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp, ar trebui să scoateți bateriile pentru a preveni eventualele scurgeri.
- Vă rugăm să ajutați la protejarea mediului: Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere! Folosiți punctele de colectare sau centrele desemnate pentru reciclare.



Acest simbol pentru produse și / sau documente însoțitoare înseamnă că produsele nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.

Acest produs vine cu două baterii AAA de 1.5V. Când ecranul LCD afișează simbolul bateriei ”▼”, este timpul să înlocuiți bateriile. După cum se arată în imaginea următoare, glisați capacul bateriei de pe capătul termometrului, introduceți noile baterii echivalente și puneți la loc cu atenție capacul bateriei.



12.SPECIFICAȚII TEHNICE

Nume produs: Termometru fără contact

Tipul de protecție împotriva șocurilor electrice: echipament alimentat intern

Gradul de protecție împotriva șocurilor electrice: tip aplicat BF

Mod de funcționare: Continuu

Acuratețe: Mod corp: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($35.0\sim 42.0^{\circ}\text{C}$) , $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($35.0\sim 42.0^{\circ}\text{C}$) exterior

Mod obiect: $\pm 0.9^{\circ}\text{F}$ ($32^{\circ}\text{F}\sim 212^{\circ}\text{F}$) / $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($0\sim 100^{\circ}\text{C}$)

Intervalul de măsurare:

Mod corp: 89.6°F la 109.4°F / 32.0°C la 42.9°C

Mod obiect: $32^{\circ}\text{F}\sim 212^{\circ}\text{F}$ / 0°C la 100°C

Temperatura de funcționare:

Mod corp: 59°F la 104°F / 15°C la 40°C

Mod obiect: 41°F la 104°F / 5°C la 40°C

Umiditate relativă: 20%~85%RH

Presiunea aerului de funcționare: 86kPa – 106kPa

Ecran: Afișaj cu cristale lichide, unitatea de afișare $0.1^{\circ}\text{F}/0.1^{\circ}\text{C}$.

Sunet: a) La pornirea dispozitivului și înainte de măsurare: 1 sunet scurt.

b) Eroare de sistem sau probleme: trei sunete scurte

c) Măsurare finalizată: un sunet lung.

d) Procesul de măsurare: sunet rapid și lent.

Memorie:

a) Afișează automat ultima valoare măsurată.

b) Stochează 30 de măsurători.

Afișaj iluminat:

- Când dispozitivul pornește, o lumină de fundal verde clipește timp de patru secunde
- Când măsurarea este finalizată, lumina de fundal verde va clipi timp de cinci secunde afișând valorile măsurate mai mici de 99.5°F/37.5°C
- Când măsurarea este finalizată, lumina de fundal roșie va clipi timp de cinci secunde afișând valorile de măsurare mai mari de 99.5°F/37.5°C

Temperatura de depozitare / transport : -4°F la 131°F/-20°C la 55°C

Umiditate relativă: <95%RH

Oprire automată: După aproximativ 3 minute fără operare.

Baterii: 3V(1.5V AAA - 2 buc) (nu sunt incluse)

Dimensiune:150mm (L) X 45mm (l) X 40mm (h)

Greutate: Aproximativ 82g (cu baterii)

13. GARANȚIE

Vă acordăm 2 ani garanție de la data achiziției. Acest produs a fost produs cu cea mai mare atenție în conformitate cu standardele internaționale de calitate, stabilite în Ghidul European pentru Produse Medicale 93/42/CEE, și a fost supus unor teste stricte înainte de livrare. Dacă aveți totuși motive de reclamație, vă rugăm să trimiteți termometrul împreună cu garanția completată la adresa de service indicată pe partea din spate.

Orice deteriorare cauzată de o manipulare necorespunzătoare nu este acoperită de garanție. Bateriile și ambalajele sunt, de asemenea, excluse de la garanție. Toate celelalte cereri de daune sunt excluse. O cerere de garanție trebuie depusă în termenul de garanție. Asigurați-vă că includeți: data achiziției, ștampila distribuitorului, precum și numele și adresa distribuitorului responsabil.

14. Declarație EMC

Ghid și declarația producătorului privind imunitatea electromagnetică.

Dispozitivul este proiectat pentru a fi folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că îl folosește în aceste condiții			
Test imunitate	IEC60601 test nivel	Nivel de conformitate	Ghid mediu electromagnetic
Descărcare electrostatică (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV aer	± 8 kV contact ± 15 kV aer	Podelele trebuie să fie din lemn, beton sau plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie să fie cel puțin 30%
Explozie electrică rapidă tranzitorie IEC 61000-4-4	± 2 kV pentru liniile de alimentare ± 1kV pentru intrare / ieșire	± 2 kV pentru liniile de alimentare ± 1kV pentru intrare / ieșire	Calitatea alimentării trebuie să fie cea tipică pentru un mediu comercial sau spitalicesc
Supratensiune	± 1 kV mod diferențial ± 2 kV mod comun	± 1 kV mod diferențial ± 2 kV mod comun	Calitatea alimentării trebuie să fie cea tipică pentru un mediu comercial sau spitalicesc

Căderi de tensiune, întreruperi scurte și variații de tensiune pe firele de alimentare IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% dip in UT) pentru 0.5 cicluri 40% UT(60% dip in UT) pentru 5 cicluri 70% UT(30% dip in UT) pentru 25 cicluri <5% UT(>95% dip in UT) pentru 5 sec	<5% UT (>95% dip in UT) pentru 0.5 cicluri 40% UT(60% dip in UT) pentru 5 cicluri 70% UT(30% dip in UT) pentru 25 cicluri <5% UT(>95% dip in UT) pentru 5 sec	Calitatea alimentării trebuie să fie cea tipică pentru un mediu comercial sau spitalicesc. Dacă utilizatorul dispozitivului VST300 necesită operarea continuă a dispozitivului în timpul întreruperii alimentării, se recomandă ca VST300 să fie alimentat de la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau de la o baterie
Frecvență alimentare (50/60Hz) Câmp magnetic IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	Câmpurile magnetice ale frecvenței de alimentare trebuie să fie la nivelul tipic pentru un mediu comercial sau spitalicesc
NOTĂ: UT este tensiunea de alimentare de la rețea înainte de aplicarea testării			

15. Declarația EMC (continuare)

Ghid și declarația producătorului privind imunitatea electromagnetică.

Dispozitivul este proiectat pentru a fi folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că îl folosește în aceste condiții			
Test imunitate	Nivel testare IEC60601	Nivel conformitate	Ghid mediu electromagnetic
RF IEC 61000-4-6 Conduc	3 V rms 150 kHz la 80 MHz	3V rms	Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu trebuie utilizate mai aproape de nicio parte a dispozitivului din seria FR, inclusiv cabluri, decât la distanța recomandată de separare calculată de ecuația aplicabilă la frecvența emițătorului Distanța de separare recomandată $d=1\sqrt{P}$
RF IEC 61000-4-3 Radiat	3V/m 80MHz la 2.5GHz	3V/m	$d=12\sqrt{P}$ 80MHz la 800MHz $d=2\sqrt{P}$ 800MHz la 2.5GHz Unde p este puterea maximă de ieșire a transmițătorului în wați (W) conform producătorului emițătorului și d este distanța de separare recomandată în metri (m). Câmpurile emițătoarelor RF fixe, determinate de un

			sondaj electromagnetic: „ar trebui să fie mai mici decât nivelul de conformitate în fiecare interval de frecvență”. Se poate produce interferență în vecinătatea echipamentelor marcate cu simbolul următor: 
Obs 1: La 80MHz și 800MHz, se aplică gama de frecvență mare. Obs 2: Este posibil ca aceste recomandări să nu se aplice în toate situațiile. Câmpurile electromagnetice sunt afectate de absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și oamenilor.			
a) Punctele cu câmp magnetic puternic ale emițătoarelor RF fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru radio-telefoane (celulare / fără fir) și radiourile mobile terestre, radio amator, transmisia radio AM și FM și transmisia TV nu pot fi prezise teoretic cu exactitate. Pentru a evalua mediul electromagnetic datorat emițătoarelor RF fixe, trebuie luat în considerare un sondaj electromagnetic. Dacă puterea măsurată a câmpului în locația în care este utilizat dispozitivul VST300 depășește nivelul de conformitate RF aplicabil mai sus, dispozitivul VST300 trebuie ținut sub observație pentru a se verifica funcționarea normală. Dacă se observă o funcționare anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea dispozitivului VST300. b) Peste gama de frecvență 150kHz la 80MHz, puterea câmpului magnetic trebuie să fie mai mică de 3V/m			

16. Declarația EMC (continuare)

Distanța de separare recomandată între echipamentul portabil și mobil de comunicații și dispozitivul din seria FR			
Dispozitivul seria FR este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care sunt controlate perturbațiile radiate RF. Clientul sau utilizatorul dispozitivului din seria FR poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele emițătoare (transmițător) portabile și mobile și dispozitivul seria FR, așa cum se recomandă mai jos, în funcție de puterea maximă de ieșire a echipamentului de comunicații.			
Puterea maximă nominală a emițătorului w	Distanța de separare conform frecvenței emițătorului m		
	150 kHz la 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80MHz la 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800MHz la 2.7GHz $d = 1.2 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Pentru emițătoarele cu o putere de ieșire maximă nemenționată mai sus, distanța de separare recomandată d în metri (m) poate fi estimată folosind ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde p este puterea maximă de ieșire a transmițătorului în wați (W) conform producătorului emițătorului. Obs 1: La 80MHz și 800MHz, se aplică gama de frecvență mare. Obs 2: Este posibil ca aceste recomandări să nu se aplice în toate situațiile. Câmpurile electromagnetice sunt afectate de absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și oamenilor.			

17. Reciclare

După terminarea duratei de viață a produsului sau când componentele sale nu mai funcționează, reciclarea acestuia ar trebui să fie efectuată conform reglementărilor în vigoare.

JIACOM

18. Simboluri și abrevieri



Părți aplicabile BF



Producător



Atenție



Urmați instrucțiunile



Număr de serie



Curent direct



Reprezentanța autorizată europeană

CE 0197 CE: Conform cerințelor esențiale ale directivei privind dispozitivele medicale 93/42 CEE.



Reciclare: Nu aruncați acest produs împreună cu deșeuri municipale nesortate. Colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratamentul special este necesară.

IP22

Gradul de protecție: Intrarea obiectelor străine solide / Intrarea apei



Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Shenzhen JIACOM Technology Co.,Ltd


Adresa: 301, No.596-4 Dahe Village, Guancheng Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, CHINA



Shenzhen Jiacom Technology Co.,Ltd
Add: 301, No.596-4 Dahe Village, Guancheng Community,
Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen,
Guangdong, CHINA



DocID:FRIFU-01
Version number: V01

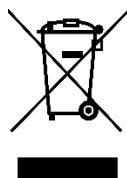

Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro